

FINNISH
BANER BT-005 FFP2 NR

KERTAKÄYTTÖINEN HENGITYKSENSUOJAIN CE0370

Brandi: BANER
Ce: 2163-PPE-742
Malli / Model: BT-005

FIN

Tuotteen nimi: BANER BT-005 FFP2 NR
Kuvaus: Hengityssuojain koostuu useasta kerroksesta ja on tarkoitettu Kertakäyttöön. Ulompi ja sisempi kerros on valmistettu kuitukankaasta ja välikerros sulatetuista tekstiileistä.

Suojaintyyppi: Kertakäyttöinen hengitys suojain
Määrä: 20kpl rasiassa
Sovellettu standardi: EN 149 : 2001 + A1:2009, FFP2 NR
Viittaus asetukseen: EU 2016/425
Valmistuspäivämäärä: Katso tuotepakkauksesta
Säilytysaika: 2-vuotta valmistuspäivämäärästä.
Käyttö: Tuote on tarkoitettu käytettäväksi suojelemaan väestöä mikro-organismeilta ja pieniltä hiukkasilta. Vain kertakäyttöön, ei steriili.

Merkinnät:

R = Uudelleenkäytettävä
NR = Ei uudelleenkäytettävä (vain yhden työvuoron ajan käytettävä)
D = Täyttää tukkeutumattomuutta koskevat vaatimukset

Varoitus:

1. Tuotetta ei tule käyttää ympäristössä, joissa on haitallisia kaasuja tai höyryjä tai hapen puutetta eikä vedenalaisessa ympäristössä.
2. Älä käytä avoimen liekin läheisyydessä (kuten hitsauksen, muovauksen jne. ainkana.)
3. Hengityksen suojaimen käyttö ei poista tartuntariskiä
4. Tuotteen käytön laiminlyönti voi johtaa sairauteen.
5. Käytä tuote kahden vuoden sisällä valmistuspäivämäärästä
6. Älä käytä, jos pakkaus vaurioitunut.

HUOMAA:

1. Tarkista hengityksensuojaimen ulkonäkö ennen käyttöä. Älä käytä sitä, jos huomaat, vaurioita, öljytahroja tai hajuja.
2. Jos koet hengenahdistusta, huimausta tai muuta epämukavuutta, poistu saatuneelta alueelta välittömästi.
3. Vaihda hengityssuojain heti uuteen, jos sinusta tuntuu, että hengittäminen on vakavaa.

SÄILYTYS:

1. Varastoitava asianmukaisesti saastuneiden alueiden ulkopuolella.
2. Vältä mekaanista räsitusta, kosteutta, korkeaa lämpötilaa, auringonpaistetta, ja kosketusta syövyttävien kemikaalien kanssa.
3. Säilytys -20-38 C:n lämpötilassa suhteellisen kosteuden ollessa <80%.

VALMISTAJA: SHANDONG JIANGPO SANITARY PRODUCTS CO., LTD
Address: East of Nanding Village, Laozhaozhuang Town, Linqing City, Shandong Province
Tel: 0371-86151827

TESTAAJA:

BeFitLab, testattu ja CE- hyväksytty standardin EN149:2001+A1:2009 mukaisesti.
Universal Certification and Surveillance Service Trade Ltd. Co.
Necip Fazal Bulvar Keyap Sitesi E2 Blok No:44/84 Yukar Dudullu Ümraniye -
ISTANBUL- TURKEY Tel: 902164558080
www.universalcert.com
Raportti nro: 2073-KKD-742
Hyväksytty testi 15.6.2020
Säilytä tämä ohje huolellisesti.

UNIVERSAL
CERTIFICATION

CE-SERTIFIKAATIN MYÖNTÄJÄ:



Universal Certification and Surveillance Service Trade Ltd. Co.

MAAHANTUONTI JA MARKKINOINTI:

Huippu Group Oy
www.hg-hygienic.fi
Puh. +358 50 441 4539 / +358 50 4904065

Hengityssuojaimen käyttö:

1. Muodosta nenälle sopiva muoto taivuttamalla nenänkiinnintä. Pidä suojainta kämmenellä niin että kiinnitysnauhat roikkuvat alaspäin.
2. Aseta suojain nenän ja suun päälle. Vedä alempi hihna niskan taakse ja ylempi hihna pään taakse.
3. Käytä molempia käsiä asettaaksesi nenänkiinnitin nenän ympärille.
4. Varmista, että suoja on tiiviisti paikallaan. Siirrä tarvittaessa hihnojen paikkaa.

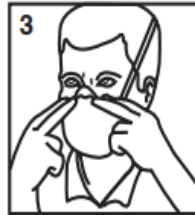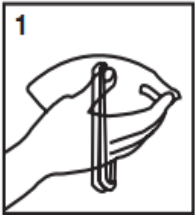

Huom! Varmista että hengityssuojain on tiivis hengittämällä voimakkaasti sisään ja ulos. Varmista ettei ilmaa pääse vuotamaan suojaimen reunoilta. Säädä tarvittaessa suojainta.

MERKKIEN SELITYKSET

Ei uudelleenkäytettävä
Kan inte återanvändas


RUMMERINGAR KOMMENTAR

Huomio, katso käyttö-ohjeet ennen käyttöä
Observera, se bruksanvisningen före användning






Älä käytä, jos pakkaus on vahingoittunut
Använd inte om paketet är skadat

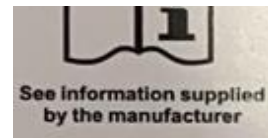

Katso valmistajan toimittamat tiedot
Se information från tillverkaren

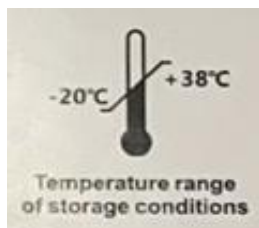

Säilytyslämpötila
Förvaringstemperatur



Varastointiolosuhteiden suurin suhteellinen
kosteus
Maximal relativ luftfuktighet för
lagringsförhållandena

SWEDISH

BANER BT-005 FFP2 NR

Brandi: BANER
CE: 2163-PPE-742
Modell: BT-005

SWE

Produktnamn: BANER BT-005 FFP2 NR
Andningskyddet består av flera lager och är avsett för engångsbruk. Det yttre och inre lagret är tillverkade av nonwoven-tyg och mellanlagret av smältblåst tyg.

Typ av andningsskydd: Andningskydd för engångsbruk.
Kvantitet: 20st förpackning
Tillämpad Standard: EN 149 : 2001 + A1:2009, FFP2 NR
Förordningens referens: EU 2016/425
Förvaringstid: Two år från tillverkningsdatumet.
Användning: Produkten är avsedd at bäras för at skydda allmänheten mot mikroorganismer och små partiklar. Endast för engångsbruk. Ej steril.

Markeringar: R = Återanvändbar
NR = Kan inte återanvändas
D = Uppfyller icke-igensättningskrav

Varningar: 1. Produkten bör inte användas i miljöer med skadliga gaser eller ångor, syrebrist eller under vatten.
2. Använd inte i närheten av öppen eld (såsom vid svetsning, formning osv.).
3. Användning av andningsskydd eliminerar inte risken för att smittas av en sjukdom eller infektion.
4. Underlåtenhet att använda och underhåll produkten enligt anvisningarna kan resultera i sjukdom.

5. Använd produkten inom two år från tillverkningsdatumet.
6. Använd inte om förpackningen är skadad.

OBSERVERA:

1. Kontrollera andningsskyddet utseende innan användning. Använd det inte om du lägger märket till skador, oljefläckar eller lukter.
2. Om du upplever andnöd och yrsel eller annat obehag, vänligen lämnä det kontaminerade området genast.
3. Byt genast ut andningsskyddet mot ett nyt om du känner att det blir svårare att andas.

FÖRVARING:

1. Måste förvaras korrekt utanför förorenade områden.
2. Undvik mekanisk belastning, fukt, hög temperatur, solsken och kontakt med frätande kemikalier.
3. Vi rekommenderar att produkten förvaras i -20-38 C med in relativ luftuktighet på <80 %.

TILVERKARE:

SHANDONG JIANGPO SANITARY PRODUCTS CO., LTD
Address: East of Nanding Village, Laozhaozhuang Town, Linqing City, Shandong Province Tel: 0371-86151827

TESTLABORATORIUM:

BeFitLab, testattu ja CE- hyväksyty standardin EN149:2001+A1:2009 mukaisesti. Universal Certification and Surveillance Service Trade Ltd. Co.
Necip Fazal Bulvar Keyap Sitesi E2 Blok No:44/84 Yukar Dudullu Ümraniye - ISTANBUL- TURKEY Tel: 902164558080
www.universalcert.com
Certifikat nummer: 2073-KKD-742
Hyväksyty testi 15.6.2020
Förvara denna bruksanvisning.

UTGIVARE AV CE-CERTIFIKAT:

Universal Certification and Surveillance Service Trade Ltd. Co.

IMPORT OCH MARKNADSFÖRING:

Huippu Group Oy
www.hg-hygienic.fi
Puh. +358 50 441 / +358 50 4904065

Bruksanvisning:

1. Håll masken i kupad hand med näskupan uppåt och gummibanden hängande.
2. Placera skyddet över näsan och munnen. Dra den nedre remmen bakom nacken och den övre bakom huvudet.
3. Använd båda händer för att placera näskupan runt näsan för att skapa god tätning.
4. Säkerställ att skyddet är tätt på sin plats. Flytta på remmarna vid behov.





OBS! Säkerställ tätningen genom att kraftigt andas in och ut. Säkerställ att luften inte tränger sig igenom ur skyddets kanter. Justera skyddet vid behov.

