

FINNISH KERTAKÄYTTÖINEN HENGITYKSENSUOJAIN CE

Tuoren disposable surgical mask type IIR

Brandi: TUOREN

EU

Malli / Moc Kertakäyttöinen kirurginen hengityssuojain TYPEIIR

FIN

Tuotteen nimi:

Kuvaus: Hengityssuojain koostuu useasta kerroksesta ja on tarkoitettu Kertakäyttöön. Ulompi ja sisempi kerros on valmistettu kuitukankaasta ja välikerros sulatetuista tekstiileistä.

Suojaintyyppi Kertakäyttöinen hengitys suojain

Määrä: 50kpl rasiassa

Sovellettu : EN14683:2019+AC:2019€

Viittaus ase ISO22609:2004

Valmistusp Katso tuotepakkauksesta

Säilytysaika 2-vuotta valmistuspäivämäärästä.

Käyttö: Tuote on tarkoitettu käytettäväksi suojelemaan väestöä mikro-organismeilta ja pieniltä hiukkasilta. Vain kertakäyttöön, ei steriili.

Varoitus: 1. Tuotetta ei tule käyttää ympäristössä, joissa on haitallisia kaasuja tai höyryjä tai hapen puutetta eikä vedenalaisessa ympäristössä.
2. Älä käytä avoimen liekin läheisyydessä (kuten hitsauksen, muovauksen jne. aikana.)
3. Hengityksen suojaimen käyttö ei poista tartuntariskiä
4. Tuotteen käytön laiminlyönti voi johtaa sairauteen.
5. Käytä tuote kahden vuoden sisällä valmistuspäivämäärästä
6. Älä käytä, jos pakkaus vaurioitunut.

HUOMAA: 1. Tarkista hengityksensuojaimen ulkonäkö ennen käyttöä. Älä käytä sitä, jos huomaat, vaurioita, öljytahroja tai hajuja.
2. Jos koet hengenahdistusta, huimausta tai muuta epämukavuutta, poistu saatuneelta alueelta välittömästi.
3. Vaihda hengityssuojain heti uuteen, jos sinusta tuntuu, että hengittäminen on vakavaa.

SÄILYTYS: 1. Varastoitava asianmukaisesti saastuneiden alueiden ulkopuolella.
2. Vältä mekaanista rasitusta, kosteutta, korkeaa lämpötilaa, auringonpaistetta, ja kosketusta syövyttävien kemikaalien kanssa.
3. Säilytys -20-38 C:n lämpötilassa suhteellisen kosteuden ollessa <80%.

VALMISTA Henan Tuoren Best Medical Device Co.,Ltd

Middle of Weft 7 Road, Nanpu District 453400 China

Changyuan, Henan, People's republic of China

Tel: 010-82074764

EMAIL:lusia@bjtuoren.com

<http://www.tuoren.com>

TESTAAJA: TUV testattu ja CE- hyväksytty standardin EN149:2001+A1:2009 mukaisesti.

TUV SUD Product testing (Shanghai) Co.,Ltd

B-3/4, NO.1999 Du Hui Road, Minhang District Shanghai 201108, P.R.China

Tel. +862160376375, www.tuv-sud.cn

Raportti nro: 721655196-2

Hyväksytty testi 30.6.2020

Säilytä tämä ohje huolellisesti.

CE-SERTIFIKAATIN MYÖNTÄJÄ:

Lotus NL B.B

Koningin Julianaplein 10, 1e, Verd

2595AA The Hague, Netherlands.

KÄYTTÖOHJE

Suu-ja nenäsuojain, I. ”kirurginen maski”

Valmistaja

Tuotenumero

Käyttöohje:

1. Varmista, että suojain on ollut säilytettynä oikein kuivassa ja lialta suojassa
2. Pese kätesi huolellisesti saippualla ennen suojaimen päähän asettamista
3. Aseta suojain sekä suun, että nenän yli ja muotoile nenäkehys oman nenäsi mukaisesti.

Varmista, että suojaimen ja kasvojen välissä ei ole näkyviä rakoja

4. Vältä koskemasta suojainta ulkona liikkuessasi.

Mikäli sinun pitää esimerkiksi korjata suojaimen asentoa tai raapia nenääsi maskin alla, pese kätesi tai käytä käsidesiä ensin

5. Poista suojain korva- tai päälennkien kautta, älä koske itse kasvosuojukseen.
6. Mikäli kyseessä on kertakäyttöinen henkilösuojain, heitä se välittömästi roskiin
7. Pese kätesi huolellisesti

Maahantuojaja: Huippu Group Oy

Laakeritie 7, 90620 OULU

Y-tunnus: 2085791-7

Puh. +358504414539 7 +358504904065

MERKKIEN SELITYKSET RUMMERINGAR KOMMENTAR



Ei uudelleenkäyttävä
Kan inte återanvändas




Huomio, katso käyttö-ohjeet ennen käyttöä
Observera, se bruksanvisningen före
användning




Älä käytä, jos pakkaus on vahingoittunut
Använd inte om paketet är skadat



Katso valmistajan toimittamat tiedot
Se information från tillverkaren

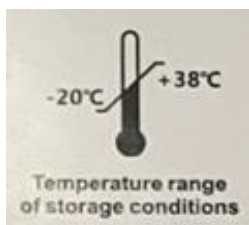

Säilytyslämpötila
Förvaringstemperatur

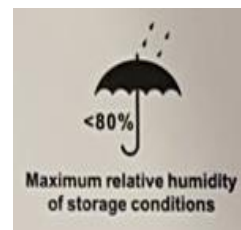

Varastointiolosuhteiden suurin suhteellinen
kosteus
Maximal relativ luftfuktighet för

lagringsförhållandena

SWEDISH

Tuoren engångskirurgisk mask typ IIR

Brandi: TUOREN

EU

Modell: Engångs kirurgisk mask typ IIR

SWE

Produktnamn:

Andningskyddet består av flera lager och är avsett för engångsbruk. Det yttre och inre lagret är tillverkade av nonwoven-tyg och mellanlagret av smältblåst tyg.

Typ av andningskydd för engångsbruk.

Kvantitet: 50st förpackning

Tillämpad EN14683:2019+AC:2019€

Förordning ISO22609:2004

Förvaringstid: Two år från tillverkningsdatumet.

Användning: Produkten är avsedd att bäras för att skydda allmänheten mot mikroorganismer och små partiklar. Endast för engångsbruk. Ej steril.

- Varningar:
1. Produkten bör inte användas i miljöer med skadliga gaser eller ångor, syrebrist eller under vatten.
 2. Använd inte i närheten av öppen eld (såsom vid svetsning, formning osv.).
 3. Andvändning av andningskydd eliminerar inte risken för att smittas av en sjukdom eller infektion.
 4. Underlåtenhet att använda och underhåll produkten enligt anvisningarna kan resultera i sjukdom.
 5. Använd produkten inom two år från tillverkningsdatumet.

6. Använd inte om förpackningen är skadad.

OBSERVERA/ 1. Kontrollera andningsskyddet utseende innan användning. Använd det inte om du lägger märket till skador, oljefläckar eller lukter.
2. Om du upplever andnöd och yrsel eller annat obehag, vänligen lämnä det kontaminera området genast.
3. Byt genast ut andningsskyddet mot ett nyt om du känner att det blir svårare att andas.

FÖRVARING/ 1. Måste förvaras korrekt utanför förorenade områden.
2. Undvik mekanisk belastning, fukt, hög temperatur, solsken och kontakt med frätande kemikalier.
3. Vi rekommenderar att produkten förvaras i -20-38 C med in relativ luftuktighet på <80 %.

TILVERKARE/ Henan Tuoren Best Medical Device Co.,Ltd
Middle of Weft 7 Road, Nanpu District 453400 China
Changyuan, Henan, People's republic of China
Tel: 010-82074764
EMAIL: lusia@bjtuoren.com
<http://www.tuoren.com>

TESTLABOR/ Testrapport utfärdas av EN149:2001+A1:2009 -standarden
TUV SUD Product testing (Shanghai) Co.,Ltd
B-3/4, NO.1999 Du Hui Road, Minhang District Shanghai 201108, P.R.China
[Tel. +862160376375](tel:+862160376375), www.tuv-sud.cn
Rapportnummer: 721655196-2
Godkänt test: 4.4,2020
Förvara denna bruksanvisning.

UTGIVARE AV CE-CERTIFIKAT:
Lotus NL B.B
Koningin Julianaplein 10, 1e, Verd
2595AA The Hague, Netherlands.

BRUKSANVISNING
Mun- och nässkydd
Tillverkare
produktnummer

1. Se till att skyddet har lagrats ordentligt på en torr och smutsfri plats
2. Tvätta händerna noggrant med tvål innan du tar på locket
3. Placera skyddet över både munnen och näsan och forma näsramen enligt din egen näsa. Se till att det inte finns några synliga mellanrum mellan skölden och ansiktet
4. Undvik att vidröra skyddet när du rör dig utomhus.
Om du till exempel behöver korrigera skyddet eller skrapa näsan under masken, tvätta händerna eller använd handskar först
5. Ta bort locket genom öron- eller huvudöglorna, rör inte själv i ansiktsskyddet.

6. För personlig skyddsutrustning, kassera den omedelbart

7. Tvätta händerna ordentligt

Importör: Huippu Group Oy

Laakeritie 7, 90620 OULU

Affärs-ID: 2085791-7

Puh. +358504414539 7 +358504904065